



## Sekusept® Easy

Desinfectante de elevada eficácia

- ▲ Fácil de preparar
- ▲ Excelente compatibilidade de materiais
- ▲ Rápida eficácia



# Sekusept® Easy

Desinfetante de elevada eficácia

## MODO DE APLICAÇÃO

Diluir o conteúdo completo de 1 garrafa de Sekusept Easy em 5-6 L de água (máx. 30 °C) e misturar. Adicionar o conteúdo completo de 1 garrafa de Activador na solução anterior e misturar. Adicionar água a esta pré-solução até atingir 10 L de água. A solução está pronta a ser usada imediatamente. Submergir o instrumental limpo na solução, garantindo que todas as superfícies estão completamente submersas e evitar que fiquem bolhas de ar presas dentro do instrumental. Consultar a tabela seguinte para os tempos de contacto. Enxaguar abundantemente com água potável ou água destilada esterilizada. Preparar uma nova solução diariamente. Utilizar as fitas indicadoras Sekusept Easy para comprovar a actividade da solução.



Sistema de bandejas Sekusept® Easy para o reprocessamento manual de instrumentos

## ÁREA DE APLICAÇÃO

Desinfecção de instrumentos médicos que tenham sido previamente lavados, tais como, endoscópios flexíveis, instrumentos em aço cromo-niquelado e instrumentos para anestesia em borracha e plástico.

## COMPOSIÇÃO

**Sekusept® Easy contém:**  
Ácido peracético, peróxido de hidrogénio, ácido acético, estabilizadores

**Activador para Sekusept® Easy contém:**

Hidróxido de sódio, fosfatos

## ACONDICIONAMENTO

**Sekusept® Easy Combi Pack**  
4 x 450 ml + 4 x 420 ml 3020470



Sekusept® Easy



Activador para Sekusept® Easy

## RESULTADOS DOS TESTES MICROBIOLÓGICOS E VIRULÓGICOS

	Tempo de contacto
EN 1040 (bactericida)	5 min
EN 13727 (bactericida) Clean	1 min
EN 1275 (fungicida)	5 min
EN 14348 (tuberculicida) Clean & Dirty	1 min
Adeno	5 min
Papova	5 min
Vaccinia	5 min
Polio	10 min
Micobactericida	10 min
Esporicida	5 min